



Klausos aparato AM111 naudojimo instrukcija

Ižanga


Brangus kliente, ,

Sveikiname išsigijus A&M skaitmeninį klausos aparatą. Šios instrukcijos padės Jums suprasti kaip reikia naudotis Jūsų naujuoju klausos aparatu. Jei visgi turėtumėt kažkokių klausimų, kreipkitės į klausos aparatų specialistą.

Turinys

Jūsų AM 111 klausos aparatas	2
Paskirtis	2
Bendros pastabos dėl naudojimo saugumo	3
Baterijų naudojimas	3
– Baterijos įdėjimas	4
– Baterijos išėmimas	4
– Baterijos skyrelio užraktas	5
Klausomojo vamzdelio (idėklo) prisitaikymas	5
– Tinkamo dydžio idėklo pasirinkimas	5
– Tinkamo vamzdelio ilgio nustatymas	5
Klausos aparato užsidėjimas ir išėmimas	6
– Klausos aparato užsidėjimas	6
– Klausos aparato nusiėmimas	6
Klausos aparato įjungimas ir išjungimas	7
Girdėjimo programos perjungimas	7
– Programa Nr. 1 “Komforto”	7
– Programa Nr. 2 “Padidintos galios”	7
Garso reguliatorius	7
Tinkamos garso kokybės nustatymas	7
– Trimerio naudojimas	7
– Tinkamos garso kokybės nustatymas	7
Klausos aparato priežiūra	8
Problemų sprendimai	8
Sunaikinimo informacija	9

Jūsų AM 111 klausos aparatas

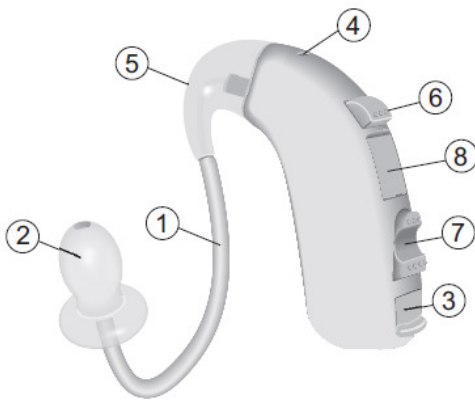

AM 111 (Baterijos tipas: 13)

Sudėtis:

1. Garso vamzdelis
2. Ausies antgalis
3. Baterijos skyrelis
4. Mikrofono anga
5. Ausies ragelis
6. Programų perjungimo mygtukas
7. Garso reguliatorius
8. Trimerio dangtelis

SVARBU

Ausies kanalo pažeidimo pavojus, netinkamai naudojant garso vamzdelius.

- Visad naudokite garso vamzdelį su ausies antgaliu.
- Įsitikinkite, kad ausies antgalis tvirtai jungiasi su garso vamzdeliu.
- Jei ausies antgalis lieka Jūsų ausyje, jis gali būti ištrauktas tik mediko.
- Būtinai pakeiskite nauju garso vamzdelį su ausies antgaliu, jei jis nutrūksta.
- Įkiškite ausis antgali atsargiai ir ne per giliai.
- Naudokitės garso vamzdeliu su ausies antgaliu tik tai taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

Klausos aparatų specialistai gali pasiūlyti platų garso vamzdelių ilgių ir ausies antgalių dydžių asortimentą ir aprinkti geriausiai tinkantį Jūsų ausiai.

Paskirtis

Klausos aparatai yra skirti pagerinti neprigirdinčiųjų klausą. Klausos nusilpimo diagnozė ir klausos aparato būtinumas turi būti nustatomi audiologijos srities specialisto, pavyzdžiui ANG daktaro, gydytojo audiologo ar akustiko.

Perskaitykite visą šią klausos aparato naudojimo instrukciją tam, kad išvengtumėte traumų ar klausos aparato sugadinimo.

SIMBOLIAI:

Atkreipkite dėmesį į užrašus pažymėtus:

PERSPĖJIMAS, SVARBU, PASTABA!

	PERSPĖJIMAS pažymi situaciją, kurioje galima rimtai susižeisti. SVARBU pažymi situaciją, kai galima lengvai ar vidutiniškai susižeisti.
PASTABA	Nurodo galimą klausos aparato pažeidimo pavojų.
	Ženklas nurodo patarimus kaip geriau naudotis Jūsų klausos aparatu
	Ženklas, parodantis, kad kažką galima padaryti

Bendros pastabos dėl naudojimo saugumo

PERSPĖJIMAS

Jūsų AM111 klausos aparatas turi 127dB (IEC 118/7) maksimalų garso išėjimo lygį. Toks garsas gali negrįžtamai pažeisti žmogaus klausą.

➤ Prieš pradėdami naudotis AM111 klausos aparatu, būtinai pasikonsultuokite su audiologijos srities specialistu, pavyzdžiui ANG daktaru, gydytoju audiologu ar akustiku.

PASTABA

Jūsų klausos aparatas yra jautrus aukštomis temperatūroms, dideliai drėgmei, stipriems magnetiniams laukams (>0,1T), rentgeno spinduliams ir mechaniniam poveikiui.

- Nenaudokite ir nepalikite klausos aparato aukštoje temperatūroje ar didelėje drėgmėje.
- Nepalikite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nuimkite klausos aparatą kai einate į dušą ar darant makiažą, naudojant odekoloną, losjoną ar plaukų laką.
- Nedėvėkite klausos aparato, kai esate didelio stiprumo elektromagnetiniame lauke ar kai Jums yra atliekamas rentgeno tyrimas.

PERSPĖJIMAS

Mažos detalės.

- Laikykite klausos aparatą ir jo baterijas vaikams nepasiekiamose vietose.
- Jei prarijote, tuo pat kreipkitės į gydytoją.
- Kūdikiams, vaikams ir psichiškai neįgalūs asmenys gali nešioti klausos aparatus, tik esant tinkamai aplinkinių priežiūrai.

PASTABA dėl baterijų naudojimo

Išbėgusios baterijos gali nepataisomai sugadinti Jūsų klausos aparatą.


- Išimkite baterijas iš klausos aparato, jei jis ilgai bus nenaudojamas.
- Išėmę iš ausies visada išjunkite klausos aparatą, kad baterijos ilgiau tarnautų ir neišbėgtų.

PERSPĖJIMAS

- Nenaudoti klausos aparato sprogiuose aplinkose.

Baterijų naudojimas

- ✓ Naudokite tik klausos aparatams skirtas baterijas.
- ✓ Visada naudokite 13 dydžio cinko – oro baterijas.
- ✓ Nuimkite baterijų lipduką tik prieš įdedant ar įdėjus jas į klausos aparatą.
- ✓ Visada turėkite atsarginę bateriją su savimi.

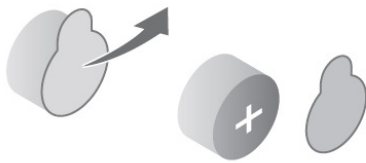


Originalus baterijos dydis

Baterijos įdėjimas

- ✓ Pilnai atverkite baterijos skyrelį nagu, kaip parodyta iliustracijoje



- ✓ Įdėkite tinkamo dydžio bateriją taip, kad “+” ženklas ant baterijos būtų tame pačiame baterijos skyrelio gale, kaip ir pažymėjimas “+” ant jo. Teigiama (+) baterijos pusė visada yra plokščioji (ant jos buvo lipdukas).

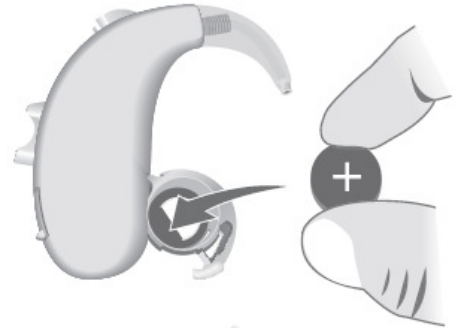

- ✓ Alternatyvus būdas: įdėkite bateriją su lipduku į viršų į baterijos skyrelį. Tada nuplėškite lipduką.

- ✓ Uždarykite baterijos skyrelį švelniai spausdami klausos aparato apačią į viršų piršto pagalvėlę.




- ✓ Nenaudokite jėgos. Jei baterijos skyrelis neužsidaro lengvai, patikrinkite ar teisingai įdėjote bateriją.

Kai baterijos skyrelis yra pilnai uždarytas, klausos aparatas yra paruoštas naudojimui.

Baterijos išėmimas

- ✓ Pilnai atidarykite baterijos skyrelį.
- ✓ Paprastai baterija iškrenta pilnai atidarius baterijos skyrelį. Tačiau jei ji neiškristų, lengvai pastuksenkite klausos aparatą arba išstumkite bateriją pieštuku, kaip parodyta paveikslėlyje.

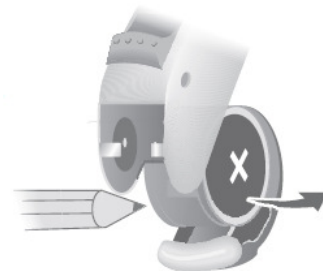

- Nemeskite panaudotų baterijų į šiukšlių dėžę. Gražinkite jas pardavėjui ar išmeskite į specialų baterijoms skirtą konteinerį.

Baterijų skyrelio užraktas

Jūsų klausos aparatas turi baterijos skyrelio užraktą. Jis apsaugo nuo netyčinio baterijų išėmimo.

Užrakinimas

- ✓ Pilnai uždarykite baterijos skyrelį.
- ✓ Pastumkite mažą raudoną slankiklį klausos aparato apačioje pieštuku kaip parodyta

Baterijos skyrelis dabar yra užrakintas.



Atrakinimas

- ✓ Pastumkite mažą raudoną slankiklį klausos aparato apačioje pieštuku į dešinę, kaip parodyta

Baterijos skyrelis dabar yra atrakintas.


Klauskite klausos aparato pardavėjo, jei Jums reikia pagalbos.



Klausomojo vamzdelio (įdėklo) prisitaikymas

Tinkamo klausos įdėklo antgalio dydžio pasirinkimas

- ✓ Laikykite klausomąjį vamzdelį su mažesniuoju ausies antgaliu tarp rodomojo piršto ir nykščio,
- ✓ Atsargiai įkiškite ausies antgalį į ausies kanalą. Kartais gali padėti ausies patempimas šiek tiek į viršų ar atgal, su kita ranka.

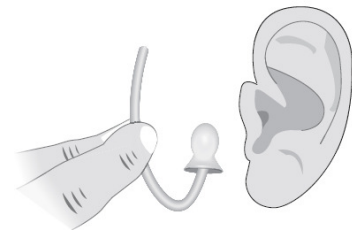

i ➤ Ausies antgalis turi būti standžiai įkištas į ausies kanalą, bet stipriai nespausti.

- ✓ Jei jaučiate, kad ausies antgalis yra labai laisvas ausies kanale, pakartokite procesą su didesniuoju įdėklu.


Tinkamo garso vamzdelio ilgio pritaikymas

Tinkamo garso vamzdelio ilgio nustatymas



➤ Jei garso vamzdelis bus per ilgas, klausos aparatas gali nukristi nuo ausies, jei per trumpas, iš ausies gali išslysti ausies antgalis.

- ✓ Užkiškite klausos aparatą už ausies .
- ✓ Priglauskite garso vamzdelį prie klausos aparato ragelio ir pažymėkite vietą, kur jie susiliečia.
- ✓ Atsargiai nusiimkite klausos aparatą ir garso vamzdelį su ausies atgaliu.
- ✓ Nukirpkite garso vamzdelį 5 mm aukščiau nuo pažymėtos vietos, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ✓ Prijunkite garso vamzdelį, prie klausos aparato ragelio.

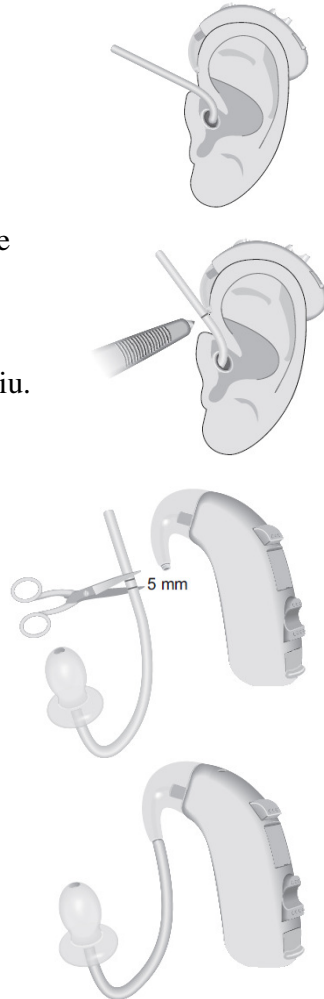

Klausos aparato užsidėjimas ir nusiėmimas

Klausos aparato užsidėjimas

PASTABA

- Įsidedant ausies antgalį į ausies kanalą nenaudokite jokių sutepėjų, nes jie gali užkišti garso išėjimo angą.

- ✓ Išjunkite klausos aparatą, atidarydami baterijos skyrelį (žr.: 9 skyrių).

- ✓ Laikykite garso vamzdelį ir ausies antgalį tarp nykščio ir rodomojo piršto ir atsargiai įkiškite jį į ausies kanalą. Kartais gali padėti ausies patempimas šiek tiek į viršų ar atgal, su kita ranka.
- ✓ Užsikiškite klausos aparatą už ausies kaip parodyta paveikslėlyje.
- ✓ Įjunkite jį, pilnai uždarydami baterijos skyrelį.



Klausos aparato nusiėmimas

- ✓ Išjunkite klausos aparatą, pradarydami baterijos skyrelį.
- ✓ Laikykite garso vamzdelį ir ausies antgalį tarp nykščio ir rodomojo piršto ir atsargiai ištraukite jį iš ausies kanalo. Kartais gali padėti ausies patempimas šiek tiek į viršų ar atgal, su kita ranka.

Klausos aparato įjungimas ir išjungimas

Įjungimas:

- ✓ Pilnai uždarykite baterijos skyrelį, tam kad įjungtumėte klausos aparatą.



Išjungimas:

- ✓ Paspauskite baterijos skyrelį žemyn, tam, kad jis išsijungtu.



Girdėjimo programų perjungimas

Jūsų AM 111 klausos aparatas turi 2 girdėjimo programas, specialioms garsinėms aplinkoms.

1 programa “Komforto”

- ✓ Naudokite šią programą kalbant keletui žmonių ir triukšmingose situacijose.
- ✓ Įjunkite klausos aparatą. Jis automatiškai įsijungs 1-oje programoje “komforto”.

2 programa “Padidintos galios”

- ✓ Naudokite šią programą tylioje aplinkoje.
- ✓ Naudokite šią programą, jei “komforto” programoje nustačius maksimalų garso stiprumą garso reguliatoriumi garso vis vien trūksta.


- ✓ Įjunkite klausos aparatą. Jis automatiškai bus 1-oje programoje.
- ✓ Paspauskite programų mygtuką vieną kartą. Klausos aparato programa pasikeis į 2-ąją.



- ✓ Dar kartą paspauskite programų perjungimo mygtuką ir klausos aparatas sugrįš į 1-ąją programą.

Garso reguliatorius

- ✓ Spauskite žingsninio garso reguliatoriaus viršutinę (siauresnę) dalį, tam, kad padidintumėte garsumą.
- ✓ Spauskite žingsninio garso reguliatoriaus apatinę (platesnę) dalį, tam, kad garsumą sumažintumėte.

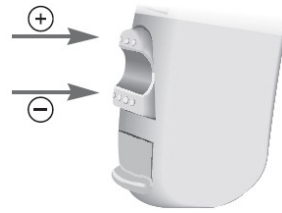

Tinkamos garso kokybės nustatymas

Trimerio naudojimas

Trimeris leidžia pakeisti žemų dažnių garsumą. Tuo būdu garso kokybė gali būti pakeista į mažiau aštrią ar duslią.

- ✓ Jeigu garsas yra per aštrus (skardus), įeinančio į komplektą atsuktuvo pagalba pasukite trimerį laikrodžio kryptimi.
- ✓ Jeigu garsas yra per duslus (neaiškus), įeinančio į komplektą atsuktuvo pagalba pasukite trimerį prieš laikrodžio kryptį.



Jūsų klausos aparatas siūlo įvairias galimybes prisitaikyti bendrą garsumą, pavyzdžiui kalbos suvokimui pagerinti. Žemiau paminėtos dvi problemos ir reikiami padaryti žingsniai garsinei situacijai pagerinti.

Garsas per stiprus

- ✓ Paspauskite žingsninį garso reguliatorių žemyn, tam kad sumažintumėt garsumą.
- ✓ Perjunkite klausos aparatą į 1-ą "komforto" programą, jei buvo įjungta antroji.
- ✓ Atsuktuvo pagalba pasukite trimerį prieš laikrodžio kryptį.

Garsas per tylus

- ✓ Paspauskite žingsninį garso reguliatorių aukštyn, tam kad padidintumėt garsumą.
- ✓ Perjunkite klausos aparatą į 2-ą "padidintos galios" programą.
- ✓ Atsuktuvo pagalba pasukite trimerį laikrodžio rodyklės kryptimi.

Klausos aparato priežiūra

Jūsų klausos aparatai yra jautrios sistemos.

Tinkama klausos aparatų priežiūra ir elgesys su jais užtikrins gerą jų veikimą.

- ✓ Reguliariai valykite klausos aparatus tam, kad išvengtumėte klausos aparatų pažeidimų ir sveikatos problemų.
- ✓ Valykite klausos aparatus naudodami minkštą, sausą audinį.
- ✓ Periodiškai džiovinkite pernakt klausos aparatus specialiu džiovinimo tablečių pagalba.



PASTABA

- Niekada nedėkite klausos aparato į vandenį!

Galimų problemų sprendimo būdai

Jūsų klausos aparatas yra patikimas įrenginys. Atsiradus problemoms, paprastai jos yra išsprendžiamos labai greitai. Naudokitės žemiau pateikiamais patarimais, padėsiančiais Jums išspręsti dažniausiai pasitaikančias problemas.

Problema	Priežastis	Galimas sprendimo būdas
Garsas per tylus	Nusilpusi ar išsiekvojusi baterija Užkištas (pvz.: siera ar prakaitu) ausies antgalis Nepakankamas garsas nustatytas garso reguliatoriumi	Įdėkite naują bateriją. Išvalykite ar pakeiskite nauju ausies antgalį su garso vamzdeliu Padidinkite garsumą (garso reguliatoriumi)
Klausos aparatas švilpia	Netinamai užkišta ausis Nustatytas per didelis garsas Ausies antgalis užkištas siera arba sieros perteklius ausyse Dėl ilgo dėvėjimo “susitraukęs” ausies antgalis	Pabandykite išimti ir vėl įdėti ausies antgalį, kol tinkamai neįsidės Sumažinkite garsumą (garso reguliatoriumi) Išvalykite ausies antgalį, išvalykite ausį Pakeiskite antgalį su garso vamzdeliu nauju
Garsas iškraipytas	Per didelis garsas Nusilpusi baterija	Sumažinkite garsumą (garso reguliatoriumi) Pakeiskite bateriją nauja
Aparatas išleidžia toninius garsus	Ne pilnai uždarytas baterijos skyrelis Nusilpusi baterija	Švelniai pilnai uždarykite baterijos skyrelį Pakeiskite bateriją nauja
Aparatas neveikia	Klausos aparatas neįjungtas Baterijos skyrelis ne pilnai uždarytas Pilnai išsikrovusi baterija Sukeistas baterijos poliarumas	Įjunkite klausos aparatą Švelniai pilnai uždarykite baterijos skyrelį Pakeiskite bateriją nauja Įsitikinkite, kad baterija įdėta teisingai

Jei Jūs vis dar turite problemų su Jūsų klausos aparatu, kreipkitės į klausos aparatų specialistą.

Sunaikinimo informacija

Juo pažymėtą įrangą Europos Sąjungoje reglamentuoja 2003 m. sausio Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektronikos ir elektroninės įrangos atliekų. Iš dalies pakeista direktyva 2003/108/EB.



PASTABA

- Sunaikinkite klausos aparatus ir baterijas remdamiesi galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.

www.hearing-am.com

www.klausostechnika.lt

Paženklindama gaminį CE ženklu, Siemens firma patvirtina, kad prietaisas atitinka Medicinos produktų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus.

