

signia

Motion 13 Nx, Motion 13P Nx

Naudotojo vadovas



Turinys

Ižanga	4
Jūsų klausos aparatai	5
Prietaiso tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	6
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	7
Valdikliai	10
Klausos programos	11
Funkcijos	12
Maitinimo elementai	13
Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo	13
Elementų keitimas	14
Kasdienis naudojimas	15
Įjungimas ir išjungimas	15
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	17
Garsumo nustatymas	20
Klausos programos keitimas	21
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	21

Ypatingos klausymosi sąlygos	22
Kalbant telefonu	22
Garso transliacija naudojant iPhone	23
Lėktuvo režimas	23
Garso indukcinės kilpos (pasirinktinai)	24
Techninis aptarnavimas ir priežiūra	25
Klausos aparatai	25
Į ausį kišamos dalys, už ausies tvirtinami rageliai ir vamzdeliai	26
Specialistų atliekama techninė priežiūra	30
Tolesnė informacija	31
Informacija saugos klausimais	31
Priedai	31
Šio dokumento simboliai	32
Trikčių diagnostika	32
Su šalimi susijusi informacija	34
Techninė priežiūra ir garantija	35

Įžanga

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet koki kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.

Jūsų klausos aparatai

i

Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

Prietaiso tipas

Jūsų klausos aparatai yra BTE (užausiniai) modeliai. Vamzdelis perduoda garsą iš klausos aparato į ausį. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologinės funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

Jūsų klausos aparatuose veikia Bluetooth® low energy* technologija, leidžianti keistis duomenimis naudojant išmanųjį telefoną ir sklandžiai transliuoti garsą naudojant iPhone**.

* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir bet koks tokių teisėto gamintojo ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

** iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas, užregistruotas JAV ir kitose šalyse.

Susipažinimas su klausos aparatu

Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir atkreipkite dėmesį, kurioje aparato vietoje jie yra. Dėl to, kai nešiosite klausos aparatą, valdiklius galėsite apčiuopti ir paspausti lengviau.

i


Jeigu įsidėjus klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, aparatą galite valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle. Naudodamiesi specialia išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

Sudedamosios dalys ir pavadinimai

Šiame naudotojo vadove aprašyta keletas klausos aparatų tipų. Naudokitės toliau pateiktais paveikslėliais, kad nustatytumėte, kurį klausos aparato tipą naudojate.


Jūsų klausos aparatas yra pritvirtintas prie už ausies tvirtinamo ragelio ir pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalies arba prie standartinio vamzdelio (ThinTube) ir standartinės į ausį kišamos dalies (LifeTip).

Motion 13 Nx

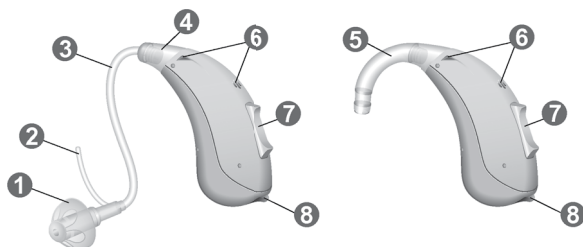

-
- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Į ausį kišama dalis (LifeTip) | 6 Mikrofono angos |
| 2 Prilaikymo juostelė (pasirinktinai) | 7 Klavišinis jungiklis (valdiklis) |
| 3 Vamzdelis (ThinTube) | 8 Maitinimo elementų skyrius (įjungimo / išjungimo jungiklis) |
| 4 ThinTube adapteris | |
| 5 Už ausies tvirtinamas ragelis | |
-

Motion 13P Nx

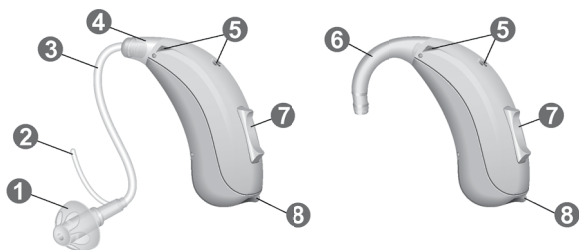



-
- | | |
|--|--|
| 1 Į ausį kišama dalis (LifeTip) | 6 Už ausies tvirtinamas ragelis |
| 2 Prilaikymo juostelė (pasirinktinai) | 7 Klavišinis jungiklis (valdiklis) |
| 3 Vamzdelis (ThinTube) | 8 Maitinimo elementų skyrius (įjungimo / išjungimo jungiklis) |
| 4 ThinTube adapteris | |
| 5 Mikrofono angos | |
-


Galite naudoti standartines į ausį kišamas dalis kartu su standartiniu vamzdeliu arba pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis kartu su už ausies tvirtinamu rageliu ir vamzdeliu.

Galite lengvai pakeisti standartines į ausį kišamas dalis ir išvalyti standartinį vamzdelį. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Standartinės į ausį kišamos dalys / vamzdeliai Dydis

 LifeTip atvirojo arba uždarojo tipo

 LifeTip pusiau atviras

 LifeTip dvigubas

ThinTube


Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys

Pavyzdžiui:



Valdikliai

Klavišiniu jungikliu galite, pavyzdžiui, reguliuoti garsumą arba perjunginėti klausos programas. Klausos specialistas užprogramavo klavišiniam jungikliui jūsų pageidautas funkcijas.

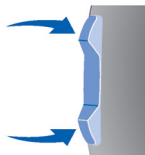

Klavišinio jungiklio funkcijos

	L (kair.)	R (deš.)
<hr/>		
Paspauskite trumpai:		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
Laikykite nuspaudę apie 2 sekundes:		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
Laikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes:		
Budėjimo rež. / įjungimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suaktyvina / išjungia lėktuvo režimą	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = kairė, R = dešinė



Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį klausos programoms keisti ir klausos aparatų garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

Klausos programos

1

2

3

4

5

6

Daugiau skaitykite skyriuje „Klausos programos keitimas“.

Funkcijos

- Pasirinkus funkciją **įjungimo delsa**, dedant klausos aparatą į ausį negirdimi švilpimo garsai.

Daugiau skaitykite skyriuje „Įjungimas ir išjungimas“.

- Ūžesio terapijos funkcija** sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.

- Teleritė** yra integruota į baterijos skyrių, todėl prie klausos aparato galima prijungti garso indukcinės kilpos.

Daugiau informacijos žr. skyriuje „Garso indukcinės kilpos“.

Maitinimo elementai

Kai maitinimo elementas senka, garsas tampa silpnesnis arba pasigirsta įspėjamasis signalas. Nuo maitinimo elemento tipo priklauso, kiek ilgai galėsite jį naudoti.

Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo

Apie rekomenduojamus maitinimo elementus teiraukitės savo klausos specialisto.

Maitinimo elementų dydis:	13
---------------------------	----

- Klausos aparatams visada naudokite tinkamo dydžio maitinimo elementus.
- Jeigu nenaudosite klausos aparatų keletą dienų, išimkite maitinimo elementus.
- Su savimi visada turėkite atsarginių maitinimo elementų.
- Iškvotus maitinimo elementus nedelsdami išimkite ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų perdirbimo taisyklių.

Elementų keitimas

Maitinimo elemento išėmimas:

- ▶ Atidarykite maitinimo elemento skyrių.



- ▶ Ištraukite maitinimo elementą, naudodami magnetinę lazdelę. Magnetinę lazdelę galima įsigyti kaip priedą.



Maitinimo elemento įdėjimas:

- ▶ Jei maitinimo elementas yra su apsaugine plėvele, ją nuimkite tik tada, kai būsite pasirengę naudoti maitinimo elementą.



- ▶ Įdėkite maitinimo elementą taip, kad „+“ simbolis būtų nukreiptas aukštyn (žr. paveikslėlių).



- ▶ Atsargiai uždarykite maitinimo elemento skyrių. Jei jaučiate pasipriešinimą, maitinimo elementas įdėtas neteisingai.

Maitinimo elemento skyriaus nebandykite uždaryti naudodami jėgą. Galite jį sulaužyti.

Kasdienis naudojimas

Ijungimas ir išjungimas

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Naudojant maitinimo elemento skyrių:

- ▶ Įjungimas: Uždarykite maitinimo elemento skyrių.
Nustatomas **numatytais** garsumas ir klausos programa.
- ▶ Išjungimas: Atidarykite maitinimo elemento skyrių iki pirmo skląščio.

Per klavišinį jungiklį:

- ▶ Įjungimas ir išjungimas: klavišinį jungiklį nuspauskite ir palaikykite kelias sekundes. Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.
Įjungus nustatomas **paskutinįjį kartą** naudotas garsumas ir klausos programa.

Galite pasirinkti, kad būtų girdimas signalas, kai nešiojant klausos aparataus jis įjungiamas arba išjungiamas.

Įjungus funkciją **Power-on delay** (įjungimo delsa), klausos aparatai įsijungia tik po kelių sekundžių. Per tą laiką įsidedant į ausis klausos aparatus nėra nemalonaus švilpimo garso.

Funkciją „Power-on delay“ (įjungimo delsa) gali įjungti klausos specialistas.

Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:


- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.



Klausos aparato įdėjimas:

- ▶ Laikykite vamzdelį prie pat į ausį kišamos dalies.
- ▶ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ①.
- ▶ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.

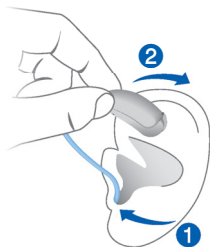

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkelkite virš viršutinės ausies dalies ②.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.

i

- Gali būti patogiau **dešinijį** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairijį** – **kairiaja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.


Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, darykite taip:

- ▶ Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies įdubos dugną (žr. paveikslėlį).



Klausos aparato išėmimas:

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkelkite virš viršutinės ausies dalies ❶.
- ▶ Laikykite vamzdelį prie pat į ausį kišamos dalies ir atsargiai ištraukite į ausį kišamą dalį ❷.

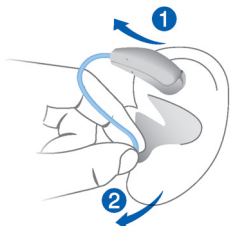

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir nudžiovinkite. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Garsumo nustatymas

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- ▶ Jeigu pageidaujate reguliuoti garsumą rankiniu būdu, paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

Klausos programos keitimas

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- ▶ Jei norite pakeisti klausos programą, paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)

Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užesio terapijos signalo lygiui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

Ypatingos klausymosi sąlygos

Kalbant telefonu

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.



Kalbėjimo telefonu programa

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- ▶ Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.

Garso transliacija naudojant iPhone

Jūsų klausos aparatai yra **Made for iPhone** (pritaikyti iPhone) klausos aparatai. Tai reiškia, kad naudodami klausos aparatus galite atsiliepti į skambučius ir klausytis muzikos iš iPhone.

Norėdami daugiau informacijos apie su iOS suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Lėktuvo režimas

Vietose, kuriose Bluetooth technologiją naudoti uždrausta (pvz., kai kuriuose lėktuvuose), galite įjungti lėktuvo režimą. Tokiu būdu jūsų klausos aparatuose laikinai išjungiamas Bluetooth ryšys. Klausos aparatus veiks ir toliau be Bluetooth ryšio, tačiau tiesioginis garso perdavimas srautu ir kitos funkcijos neveiks.

- ▶ Norėdami įjungti arba išjungti lėktuvo režimą, naudokite išmaniojo telefono programėlę arba klausos aparatų valdiklius.

Daugiau informacijos žr. skyriuje „Valdikliai“.

Apie įjungtą arba išjungtą lėktuvo režimą praneša įspėjamasis garsinis signalas.

Garso indukcinės kilpos (pasirinktinai)

Kai kuriuose telefonuose ir viešosiose vietose, pvz., teatruose, galima garso signalo (muzikos arba kalbos) per garso indukcinę kilpą paslauga. Naudojant šią sistemą klausos aparatai tiesiogiai priima pageidaujama signalą, bet aplinkos garsas neiškraipomas.

Jeigu naudojama garso indukcinės kilpos sistema, apie tai dažniausiai informuojama atitinkamais ženklais.



Jeigu norite naudoti šią sistemą, reikalingas specialus maitinimo elementų skyrius. Jis gali būti kaip priedas tik tam tikrų tipų instrumentuose. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

Kur bebūtumėte su garso indukcinė kilpa:

- ▶ Įjunkite teleritės programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar teleritės programa sukonfigūruota jūsų klausos aparatui.

Teleritės programa ir nuotolinio valdymo pultelis



PASTABA

Skirta tik belaidžio ryšio funkciją turintiems aparatams:

suaktyvintus indukcinės ritės (teleritės) programą, dėl nuotolinio valdymo pultelio gali būti girdimas ritmingas garsas.

- ▶ Naudokite nuotolinio valdymo pultelį didesniu nei 10 cm (4 col.) atstumu.

Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

Klausos aparatai

Džiovinimas ir laikymas

- ▶ Leiskite savo klausos aparatams nudžiūti per naktį.
- ▶ Kai klausos aparatų nenaudojate ilgesnį laiką, laikykite juos sausoje patalpoje, atidarę maitinimo elementų skyrių ir išėmę maitinimo elementus.
- ▶ Jei reikia daugiau informacijos, klauskite klausos specialisto.

Valymas

Klausos aparatai yra padengti apsaugine dangą. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniu ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkitė prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.
- ▶ Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiųjų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.



Į ausį kišamos dalys, už ausies tvirtinami rageliai ir vamzdeliai

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė.

- Skirta klausos aparatams su standartiniu vamzdeliu (ThinTube):

Į ausį kišamas dalis valykite kasdien, o vamzdelius, kai reikia.

Į ausį kišamas dalis ir vamzdelius keiskite maždaug kas tris šešis mėnesius arba anksčiau, jeigu pastebėjote įtrūkimų arba kitų pakitimų.

- Skirta klausos aparatams su už ausies tvirtinamu rageliu:

Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.


Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, jas pakeiskite.

Paprašykite klausos priežiūros specialisto, kad išvalytų vamzdelius arba, jeigu reikia, pakeistų į ausį kišamas dalis ir vamzdelius.

Ausies dalių valymas

- ▶ Išėmę į ausį kišamas dalis, nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.

Taip ausų siera neprisidžius ir nesukietės.

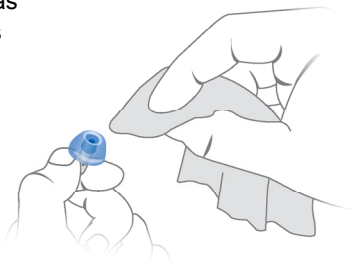


- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite į ausį kišamos dalies į vandenį.

Standartinių vamzdelių valymas

Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite vamzdelio į vandenį.

Standartinius vamzdelius galite valyti (ThinTube) naudodami specialią valyti skirtą vielutę. Kreipkitės į savo klausos specialistą dėl tinkamų valyti skirtų vielučių.


- ▶ Atjunkite vamzdelį ir adapterį atsukdami adapterį nuo klausos aparato.
- ▶ Į adapterį atsargiai įkiškite valyti skirtą vielutę ①.
- ▶ Stumkite valyti skirtą vielutę iki vamzdelio galo ②.

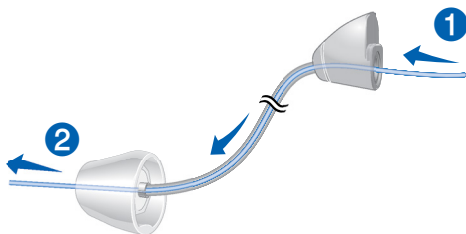

- ▶ Ištraukite sierą ir visus nešvarumus.
- ▶ Ištraukite visą valyti skirtą vielutę.
- ▶ Vėl pritvirtinkite vamzdelį ir adapterį prie klausos aparato.

Standartinių į ausį kišamų dalių pakeitimas (LifeTip)

- ▶ Ištraukite naudotą į ausį kišamą dalį ir prijunkite naują į ausį kišamą dalį.

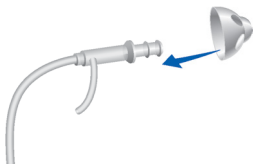

Standartinių vamzdelių ir adapterių pakeitimas

- ▶ Atsukite naudotą vamzdelį nuo adapterio ①.
- ▶ Jei reikia, atsukite naudotą adapterį ②.




- ▶ Prisukite naują adapterį ir vamzdelį.

Už ausies tvirtinamų ragelių keitimas

- ▶ Atsukite naudotą už ausies tvirtinamą ragelį.
- ▶ Išdėstykite už ausies tvirtinamą ragelį ant sriegio kaip parodyta ① pav.
- ▶ Atsargiai pasukite už ausies tvirtinamą ragelį tris pilnus pasukimus ②.

Daugiau nesukite, kad nesugadintumėte.

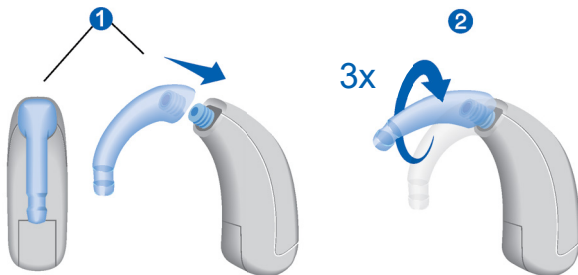

Specialistų atliekama techninė priežiūra

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis ir ausų sieros filtrus prireikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų rekomendacijos jums dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

Tolesnė informacija

Informacija saugos klausimais

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.

Priedai

Galite naudoti programėlę myControl App, su kuria galite savo klausos aparatus patogiai valdyti nuotoliniu būdu. Naudodami programėlę taip pat galite išjungti signalinius tonus, kurti asmeninius garso profilius ir atlikti daugelį kitų funkcijų.

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

Šio dokumento simboliai



Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.



„Made for iPhone“ (skirta iPhone) reiškia, kad elektroninis įrenginys sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone ir kad kūrėjas patvirtino, kad prietaisas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą arba už tai, ar jis atitinka saugos arba reglamentinius standartus. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone gali paveikti belaidžio ryšio veikimą.

Trikčių diagnostika

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Pagarsinkite.
 - Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite vamzdelį ir į ausį kišamą dalį.
-

Problema ir galimi sprendimai

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
 - Pritildykite.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Garsas iškraipomas.

- Pritildykite.
 - Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite vamzdelį ir į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
-

Klausos aparatas neveikia.

- Įjunkite klausos aparatą.
 - Atsargiai iki galo uždarykite maitinimo elemento skyrių.
 - Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
 - Įsitikinkite, kad maitinimo elementas įdėtas taisyklingai.
 - Įjungta įjungimo delsa. Palaukite keletą sekundžių ir patikrinkite dar kartą.
-

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Su šalimi susijusi informacija

JAV ir Kanada

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

Motion 13 Nx

- FCC ID: SGI-BTE001
- IC: 267AB-BTE001

Motion 13P Nx

- Taisyklės galioja FCC ID: SGI-RFM001, SGI-MIM001
- IC: 267AB-WP4N1

Techninė priežiūra ir garantija

Serijos numeriai

Kairė:

Dešinė:

Techninės priežiūros datos

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantija

[sigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

Jūsų klausos specialistas

 **Teisētas gamintojas**

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Vokietija

Tel. +49 9131 308 0

Document No. 03340-99T02-8X00 LT

Order/Item No. 109 506 56

Master Rev02, 12.2017

© 03.2018, Signia GmbH. All rights reserved


0123

www.signia-hearing.com