



BE2022 Maxi Pro TV transliatorius



Apie Bellman Maxi Pro TV transliatorių

Maxi Pro TV transliatorius leidžia jums girdėti televiziją tokiu garsumu, kuris tinka jums, neįtakojant garsumo visiems kitiems, esantiems kambaryje. Jis transliuoja TV garsą stereo režimu belaidžiu Bluetooth būdu tiesiai į jūsų Maxi Pro asmeninį stiprintuvą.

Ką rasite dėžutėje

Be paties transliatoriaus dėžutėje rasite sekančius dalykus:

Mini-stereo laidas




Mini-stereo į RCA adapteris




Optinis laidas



Nuolatinės srovės į USB jungtį laidas

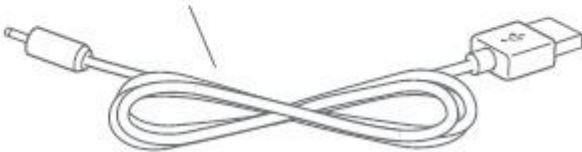


Matinimo adapteris
(Tinklo kištukas gali skirtis)

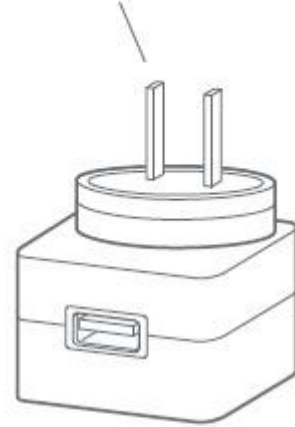

Nuo ko pradėti:

Tam, kad nustatytumėt Tv transliatorių, jums taip pat reikės:

Tv imtuvas su RCA, ausinių ar optiniu audio išvesties lizdu

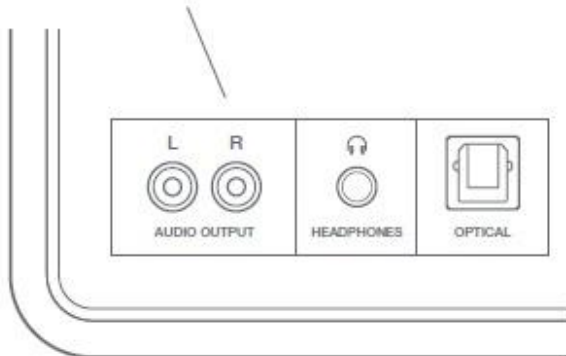

Maxi Pro asmeninis stiprintuvas



TV transliatoriaus pirminis įrengimas


Žingsnis 1: Audio prijungimas

Yra keletas būdų, kaip prijungti TV transliatorių prie jūsų TV imtuvo. Tai priklauso nuo to, kokias audio (garso) išvesties lizdus turi jūsų TV imtuvas.

Kaip prijungti prie TV imtuvo RCA išvesties lizdų

1. Prijunkite vieną mini-stereo laido galą prie audio lizdo TV transliatoriaus audio įvesties lizdo šone, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite kitą šio laido galą prie patekto mini-stereo į RCA adapterio lizdo.
3. Prijunkite RCA kištukus prie jūsų TV imtuvo audio išvesties lizdų.


Pastaba: Jūs taip pat galite prijungti mini-stereo kabelį tiesiogiai prie jūsų TV imtuvo ausinių lizdo. Atsiminkite, kad kai kuriuose TV imtuvų modeliuose toks prijungimas gali išjungti vidinius televizoriaus garsiakalbius ir garsas bus transliuojamas tik TV transliatoriumi į Maxi Pro, o aplinkiniai jokio garso negirdės.

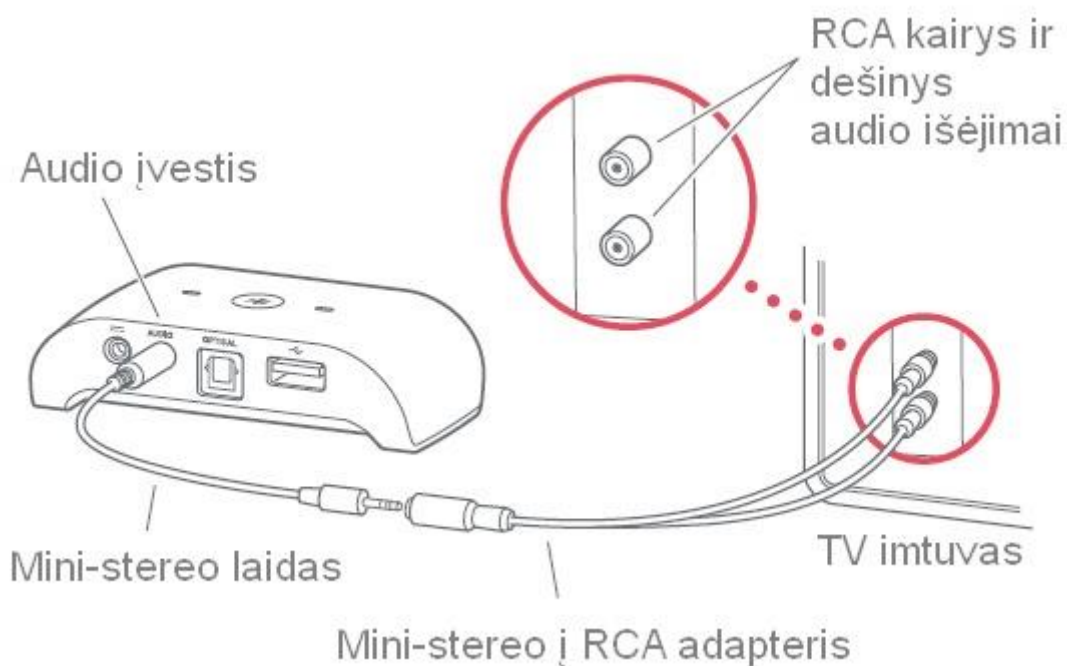

Kaip prijungti prie TV imtuvo optinės išvesties lizdo

Jei jūsų TV imtuvas turi optinę išvestį, jūs galite panaudoti pridėtą optinį laidą TV transliatoriaus prijungimui prie jūsų TV imtuvo. Žemiau instrukcija kaip tai padaryti:


1. Prijunkite vieną optinio laido galą prie TV transliatoriaus optinės įvesties lizdo.
2. Prijunkite kitą optinio laido galą prie jūsų TV imtuvo optinės išvesties lizdo.

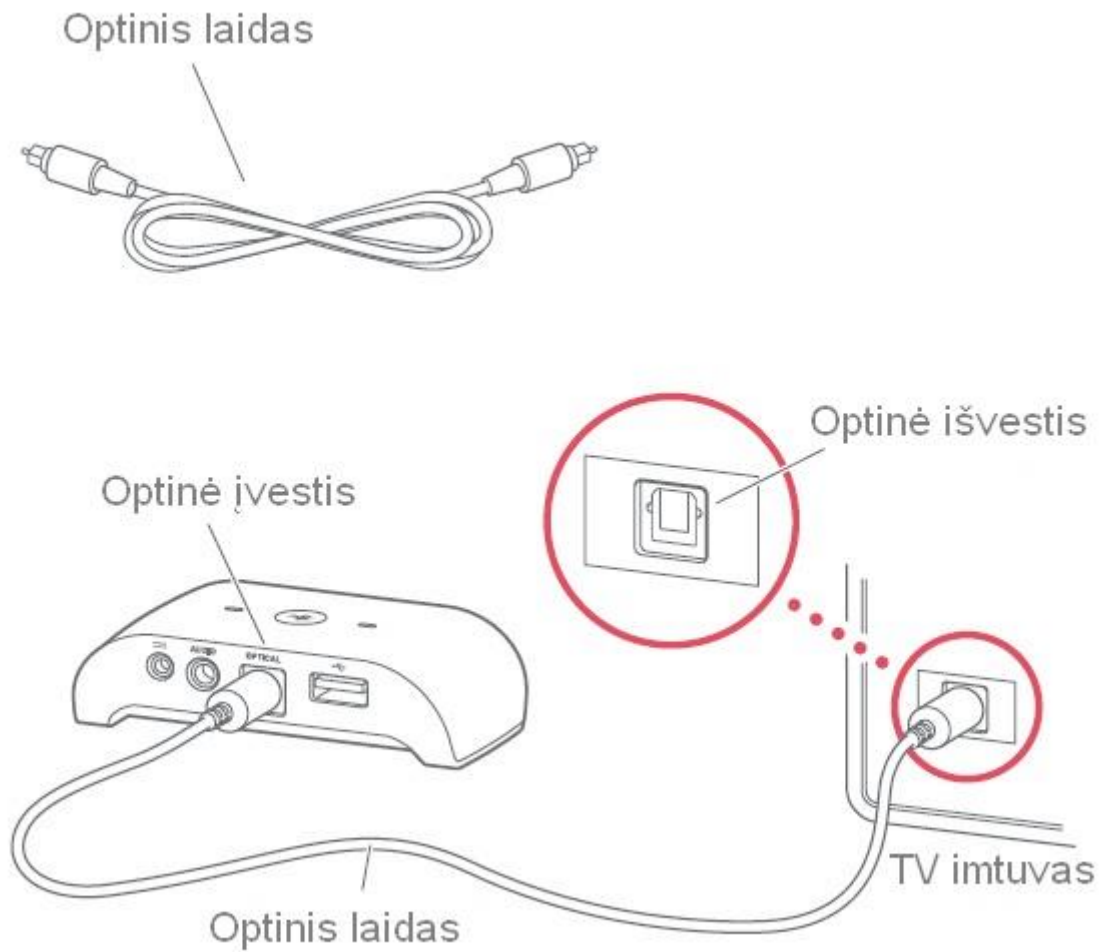

Žingsnis 2: Maitinimo laido prijungimas

1. Prijunkite nuolatinės srovės į USB laido kištuką prie TV transliatoriaus šone esančio maitinimo įvesties lizdo.
2. Prijunkite kitam šio laido gale esantį USB kištuką prie komplekte esančio maitinimo šaltinio lizdo
3. Įkiškite tinklo adapterį į maitinimo šaltinį ir įsitikinkite, kad jis gerai užsifiksavo. Tada prijunkite maitinimo prie elektros tinklo. Maitinimo indikatorius ant TV transliatoriaus turi užsižiebtį žalia spalva.

Pastaba: Jūs taip pat galite maitinti jūsų TV transliatorių tiesiogiai iš jūsų TV imtuvo, prijunkdami USB laido kištuką prie jūsų televizoriaus USB išėjimo lizdo.

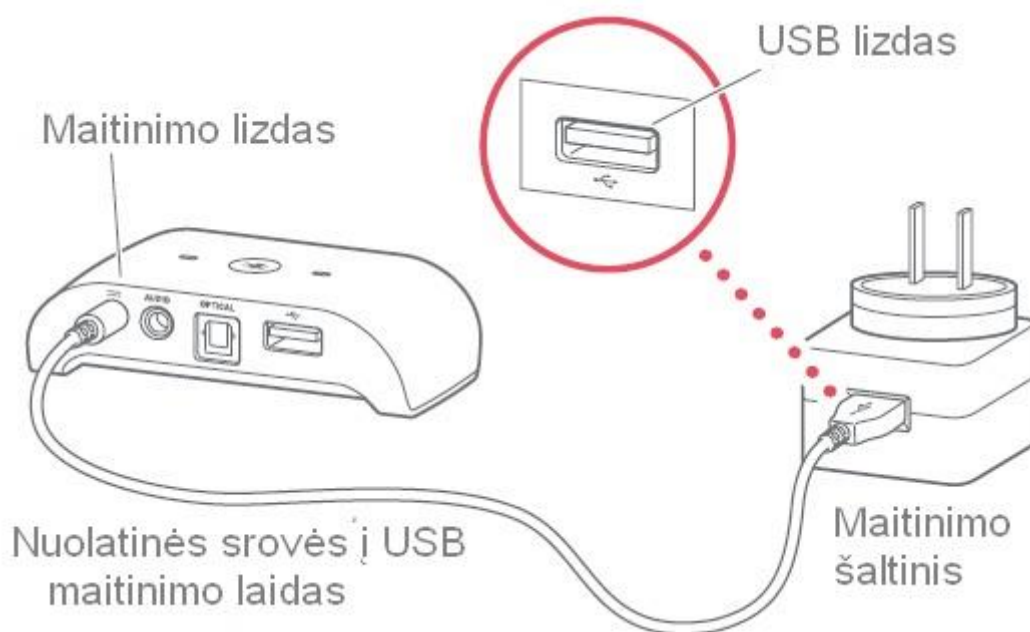

Žingsnis 3: Poravimas

Pastaba: Jei jūs įsigijote Maxi Pro grupinę pakuotę, kurioje buvo ir šis TV transliatorius, jums poruoti įrenginių nereikia, nes jie jau buvo suporuoti gamykloje

1. Ant TV transliatoriaus: Paspauskite ir laikykite nuspaudę Bluetooth mygtuką iki kol Bluetooth indikatorius pradės blyksėti mėlynai.
2. Ant jūsų Maxi Pro įrenginio: Paspauskite mikrofono pasirinkimo mygtuką. Tada paspauskite ir laikykite nuspaudę Bluetooth pasirinkimo mygtuką iki kol Bluetooth indikatorius pradės blyksėti mėlynai.
3. Greit abiejų įrenginių Bluetooth indikatoriai pradės nepertraukiamai degti mėlynai, informuodami jus, kad poravimas buvo sėkmingas ir abu įrenginiai nuo šiol bendraus tarpusavyje.

Naudojimas jūsu TV transliatoriumi

Ijungimas

1. Paspauskite Bluetooth mygtuką, tam kad įjungtumėt TV transliatorių. Maitinimo indikatorius užsidegs žaliai.
2. Įsijungdamas TV transliatorius automatiškai prisijungs prie suporuoto Maxi Pro asmeninio stiprintuvo. Abiejų įrenginių Bluetooth indikatoriai užsižiebs mėlynai, tam, kad parodytų, kad abu įrenginiai susijungė.

Išjungimas

TV transliatorius išsijungs automatiškai po 15 minučių: jei nebus audio signalo (pvz.: TV imtuvas bus išjungtas) arba nebus Bluetooth ryšio su Maxi Pro (pvz.: Maxi Pro bus išjungtas arba per toli nutolęs nuo TV transliatoriaus).

Jūsų Maxi Pro įkrovimas

Jūs taip pat galite įkrauti jūsų Maxi Pro tiesiogiai iš TV transliatoriaus!

1. Prijunkite jūsų Maxi Pro įkrovimo laido USB galą prie USB įkrovimo įvesties lizdo, esančio TV transliatoriaus šone.
2. Prijunkite kitą šio laido galą prie Maxi Pro įkrovimo lizdo.
3. Maxi Pro baterijos indikatorius blyksės žaliai įkrovimo metu.



Trikčių šalinimas

JEIGU	Bandykite tai
Nieko nevyksta kai aš paspaudžiu MAXi Pro TV transliatoriaus Bluetooth mygtuką.	• Įsitinkite, kad Maxi Pro TV transliatorius yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, žr.: Maitinimo laido prijungimas.
Aš negirdžiu savo ausinėse TV garso	• Įsitinkite, kad Maxi Pro yra pasiekiamumo zonoje ir yra suporuotas su jūsų TV transliatoriumi, žr.: Poravimas.
TV garsas išnyksta, kad aš prijungiu mini-stereo laidą prie ausinių išvesties lizdo.	• Tai yra kai kurių TV imtuvų modelių savybė. Naudokite RCA ar optinę TV imtuvo išvestis vietoje ausinių išvesties, žr.: Audio prijungimas.

Naudojimas ir priežiūra

Naudokite produktą sausoje aplinkoje kur temperatūra yra tarp 0° ir 35° C.

Valykite produktą minkštu, sausu, nepūkuotu audiniu. Venkite drėgmės patekimo į angas. Nenaudokite langų valiklių, buitinių valymo priemonių, aerosolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar abrazyvų.

Jei produktas atrodo pažeistas ar nefunkcionuoja normaliai, sekite šio dokumento instrukcijomis. Jei produktas vis tiek nefunkcionuoja, kaip turėtų, kontaktuokite su produkto tiekėju dėl garantinio ar negarantinio remonto. Maxi Pro TV transliatoriaus garantinis periodas yra 2 metai nuo pardavimo datos. Garantija netaikoma ausinėms, taip pat negalioja fizinių pažeidimų atvejais, bei gedimams atsiradusiems dėl netinkamos eksploatacijos (eksploatuojant ne taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje), pavyzdžiui įrenginį sušlapinus.

Tiekėjas

UAB „Klausos technika“

www.klausostechnika.lt

info@klausostechnika.lt

Telefonai:

Kaunas: 8 37 332 777

Vilnius: 8 5 2 617 024

Klaipėda: 8 46 343 755