

# Motion Charge&Go Nx

Vadovas klausos priežiūros specialistams



Made for

 **iPhone** | **iPad** | **iPod**

# Turinys

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Įvadas</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>Prieš pritaikymą ir po jo</b> | <b>4</b>  |
| Surinkimas                       | 4         |
| Aktyvinimas                      | 5         |
| Įkrovimas                        | 5         |
| Prijungimas                      | 5         |
| Serijos numerio vieta            | 6         |
| <b>Korpuso keitimas</b>          | <b>7</b>  |
| Išardymas                        | 7         |
| Surinkimas                       | 9         |
| <b>Tolesnė informacija</b>       | <b>11</b> |
| Šio dokumento simboliai          | 11        |

# Įvadas

Šis vadovas yra skirtas klausos priežiūros specialistams. Jame pateikiama svarbi informacija apie klausos aparatus su neišimamais maitinimo elementais (ličio jonų).



## **PERSPĖJIMAS**

Svarbu atidžiai perskaityti šį vadovą, naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.


# Prieš pritaikymą ir po jo

Prieš pradėdami pritaikyti klausos aparatus, juos turite paruošti.


## Surinkimas

- Kiekviename naujame klausos aparate įdėtas maitinimo elementas. Maitinimo elemento įdėti nereikia.
- Pritvirtinkite tinkamą ThinTube su adapteriu arba prie klausos aparatų pritvirtinkite už ausies tvirtinamą ragelį.

Pritvirtinkite už ausies tvirtinamą ragelį:

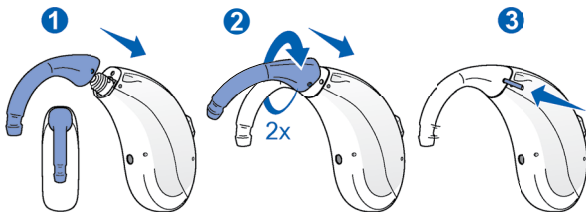

Pritvirtinkite ThinTube ir adapterį:

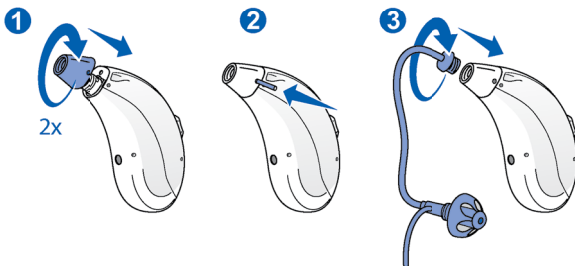

## Aktyvinimas

Prieš pirmą kartą naudodami ar pirmą kartą pritaikydami klausos aparatus, turite juos suaktyvinti įdėdami į įkroviklį. Palaukite, kol pradės šviesti pirmas oranžinis LED diodas.

Pastaba:

- Suaktyvinti ir **nenaudojami** klausos aparatai gali išsikrauti greičiau nei **nesuaktyvinti** klausos aparatai. Klausos aparatus suaktyvinkite tik prieš pirmą kartą juos naudodami ar pirmą kartą pritaikydami.

## Įkrovimas

Pristatyti klausos aparatai yra iš anksto įkrauti. Jie turėtų būti pakankamai įkrauti pirmam pritaikymo seansui.

Prieš klausos aparatus pirmą kartą pritaikant ir perduodant klientui, rekomenduojame juos visiškai įkrauti. Visiško įkrovimo ciklas trunka maždaug 4 val.

Laikykitės naudojimo sąlygų, pateiktų klausos aparato ir įkroviklio naudotojo vadove.

## Prijungimas

Naudokite Noahlink Wireless, kad galėtumėte prijungti klausos aparatus belaidžiu būdu.

## Serijos numerio vieta

Serijos numeris ir eksploatacinių savybių lygis yra atspausdinti ant korpuso **ir** ant rėmo.



- Pakeitus korpusą:
  - Nenaudokite senojo korpuso su įspaustu serijos numeriu.
  - Pasižymėkite serijos numerį naudotojo vadove, paskutiniame puslapyje. Tada jums nereikės nuimti korpuso, kad pamatytumėte serijos numerį.
- Kai klausos aparatas grąžinamas po mūsų techninės priežiūros:

Jei gaunate klausos aparatą be serijos numerio ant korpuso, nuimkite korpusą ir dar kartą patikrinkite serijos numerį ant rėmo. Klausos aparatas gali turėti naują serijos numerį. Pasižymėkite šį naują serijos numerį naudotojo vadove, paskutiniame puslapyje.

# Korpuso keitimas



## PASTABA


- Šią techninės priežiūros užduotį turi atlikti klausos specialistas.

Kai išmontuosite korpusą su įspaustu serijos numeriu, išmeskite korpusą.


## Išardymas

- Nuimkite už ausies tvirtinamą ragelį arba ThinTube su adapteriu.


Nuimkite už ausies tvirtinamą ragelį:

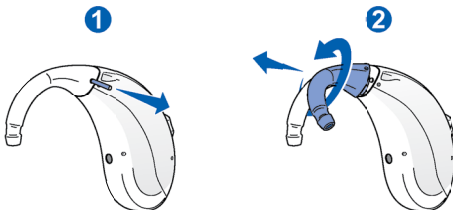



Nuimkite ThinTube su adapteriu:

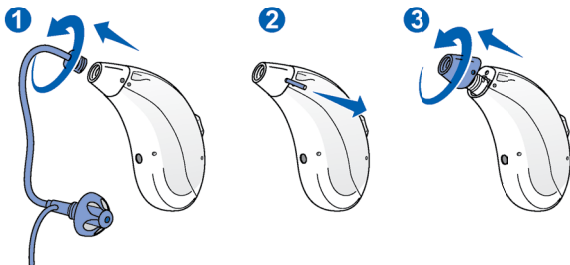


- Nuimkite ašis nuo korpuso.

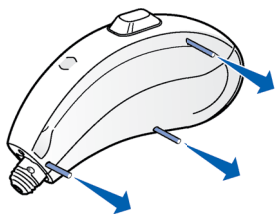

- Nuimkite viršutinį korpusą ir nuimkite mygtuką.

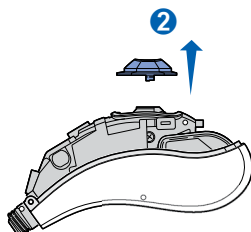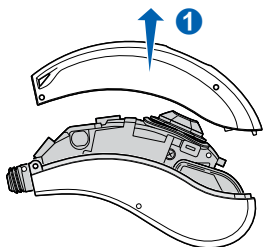


- Ištraukite apatinį korpusą.

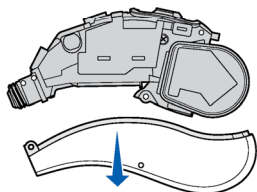





## Surinkimas


- Išlygiuokite apatinį korpusą ir aparatą. Tada uždėkite apatinį korpusą.

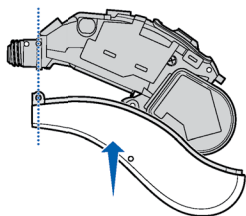


- Uždėkite mygtuką ir viršutinį korpusą.

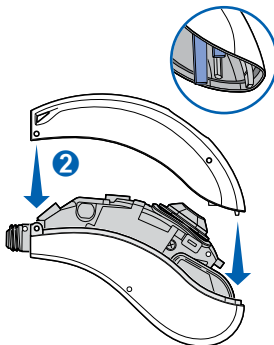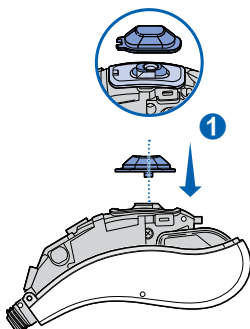

- Pritvirtinkite ašis. Atkreipkite dėmesį, kad skiriasi ašių ilgis ir skersmuo.

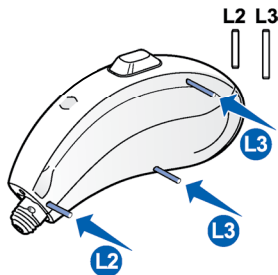


- Įdėkite šoninį indikatorį.

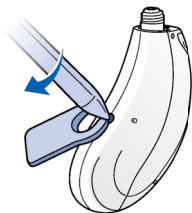


- Pritvirtinkite tinkamą ThinTube su adapteriu arba prie klausos aparatų pritvirtinkite už ausies tvirtinamą ragelį.

Pritvirtinkite už ausies tvirtinamą ragelį:

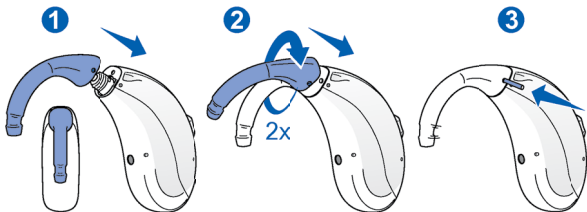

Pritvirtinkite ThinTube ir adapterį:

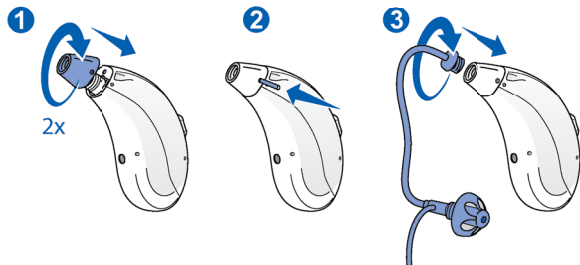

# Tolesnė informacija

## Šio dokumento simboliai



Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Ispėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.

---

Made for



iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ ir „Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų atitikimą. Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio veikimą.



## **Teisētas gamintojas**

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Vokietija

Tel. +49 9131 308 0

Document No. 03606-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 109 606 50

Master Rev03, 08.2018

© 09.2018, Signia GmbH. All rights reserved



**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**