

signia

# Pure 312 X

Naudotojo vadovas



# Turinys

<b>Ižanga</b>	<b>4</b>
<b>Jūsų klausos aparatai</b>	<b>5</b>
Prietaiso tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	6
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	7
Valdikliai	9
Klausos programos	10
Funkcijos	10
<b>Maitinimo elementai</b>	<b>11</b>
Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo	11
Elementų keitimas	12
<b>Kasdienis naudojimas</b>	<b>13</b>
Įjungimas ir išjungimas	13
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	14
Garsumo nustatymas	18
Klausos programos keitimas	18
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	19

<b>Ypatingos klausymosi sąlygos</b>	<b>20</b>
Kalbant telefonu	20
Garso transliacija naudojant iPhone	21
Lėktuvo režimas	21
Garso indukcinės kilpos (pasirinktinai)	22
<b>Techninis aptarnavimas ir priežiūra</b>	<b>23</b>
Klausos aparatai	23
Į ausį kišamos dalys	24
Specialistų atliekama techninė priežiūra	27
<b>Tolesnė informacija</b>	<b>28</b>
Informacija saugos klausimais	28
Priedai	28
Šio dokumento simboliai	28
Trikčių diagnostika	29
Su šalimi susijusi informacija	30
Techninė priežiūra ir garantija	31

## Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokį kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



### **PERSPĖJIMAS**

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.

## Jūsų klausos aparatai

**i** Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

### Prietaiso tipas

Jūsų klausos aparatai yra su įlandiniu garsiakalbiu (RIC). Imtuvas yra įdedamas į ausies kanalą ir sujungiamas su prietaisu imtuvo laidu. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologinės funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

Jūsų klausos aparatuose veikia Bluetooth® low energy\* technologija, leidžianti keistis duomenimis naudojant išmanųjį telefoną ir sklandžiai transliuoti garsą naudojant iPhone\*\*.

\* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir bet koks tokių teisėto gamintojo ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

\*\* iPad, iPhone ir iPod yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

## Susipažinimas su klausos aparatu

Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir atkreipkite dėmesį, kurioje aparato vietoje jie yra. Dėl to, kai nešiosite klausos aparatą, valdiklius galėsite apčiuopti ir paspausti lengviau.

**i** Jeigu įsidėjus klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, aparatą galite valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle. Naudodamiesi specialia išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.





## Sudedamosios dalys ir pavadinimai

Šiame naudotojo vadove aprašyta keletas klausos aparatų tipų. Naudokitės toliau pateiktais paveikslėliais, kad nustatytumėte, kurį klausos aparato tipą naudojate.





- 
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ① Į ausį kišama dalis | ⑤ Klavišinis jungiklis (valdiklis)  |
| ② Imtuvas             | ⑥ Maitinimo elementų skyrius (įjungimo/išjungimo jungiklis)                                   |
| ③ Imtuvo laidas       | ⑦ Pusės indikatorius (raudonas = dešinioji ausis, mėlynas = kairioji ausis) ir imtuvo jungtis |
-

Galite naudoti toliau išvardytas standartines į ausį kišamas dalis:

<b>Standartinės į ausį kišamos dalys</b>	<b>Dydis</b>
<input type="radio"/>  Click Sleeve (pralaidžiojo arba uždarojo tipo)	
<input type="radio"/>  Click Dome™ viengubas (atvirojo arba uždarojo tipo)	
<input type="radio"/>  Click Dome pusiau atviras	
<input type="radio"/>  Click Dome dvigubas	

Standartinės į ausį kišamos dalis galite lengvai pakeisti. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

#### **Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys**

<input type="radio"/>  Pritaikytasis įdėklas	
<input type="radio"/>  Click Mold™	



## Valdikliai

Klavišiniu jungikliu galite, pavyzdžiui, reguliuoti garsumą arba perjunginėti klausos programas. Klausos specialistas užprogramavo klavišiniam jungikliui jūsų pageidautas funkcijas.



### Klavišinio jungiklio funkcijos

	L	R
<b>Paspauskite trumpai:</b>		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Laikykite nuspaudę apie 2 sekundes:</b>		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Laikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes:</b>		
Budėjimo rež. / įjungimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suaktyvina / išjungia lėktuvo režimą	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = kairė, R = dešinė



**i** Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį klausos programoms keisti ir klausos aparatų garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

## Klausos programos

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Daugiau skaitykite skyriuje „Klausos programos keitimas“.

## Funkcijos

- Pasirinkus funkciją **įjungimo delsa**, dedant klausos aparatą į ausį negirdimi švilpimo garsai.  
Daugiau skaitykite skyriuje „Įjungimas ir išjungimas“.
- Ūžesio terapijos funkcija** sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.
- Teleritė** yra integruota į baterijos skyrių, todėl prie klausos aparato galima prijungti garso indukcinės kilpas.  
Daugiau informacijos žr. skyriuje „Garso indukcinės kilpos“.



## Maitinimo elementai

Kai maitinimo elementas senka, garsas tampa silpnesnis arba pasigirsta įspėjamasis signalas. Nuo maitinimo elemento tipo priklauso, kiek ilgai galėsite jį naudoti.

### Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo

Apie rekomenduojamus maitinimo elementus teiraukitės savo klausos specialisto.

---

Maitinimo elementų dydis:	312
---------------------------	-----

---

- Klausos aparatams visada naudokite tinkamo dydžio maitinimo elementus.
- Jeigu nenaudosite klausos aparatų keletą dienų, išimkite maitinimo elementus.
- Su savimi visada turėkite atsarginių maitinimo elementų.
- Išseiktus maitinimo elementus nedelsdami išimkite ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų perdirbimo taisyklių.


## Elementų keitimas

Maitinimo elemento išėmimas:

- X** Atidarykite maitinimo elemento skyrių.



- X** Ištraukite maitinimo elementą, naudodami magnetinę lazdelę. Magnetinę lazdelę galima įsigyti kaip priedą.

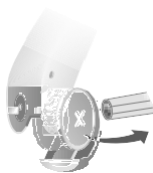

Maitinimo elemento įdėjimas:

- X** Jei maitinimo elementas yra su apsaugine plėvele, ją nuimkite tik tada, kai būsite pasirengę naudoti maitinimo elementą.



- X** Įdėkite maitinimo elementą taip, kad „+“ simbolis būtų nukreiptas aukštyn (žr. paveikslėlių).



- X** Atsargiai uždarykite maitinimo elemento skyrių. Jei jaučiate pasipriešinimą, maitinimo elementas įdėtas neteisingai.

Maitinimo elemento skyriaus nebandykite uždaryti naudodami jėgą. Galite jį sulaužyti.



## Kasdienis naudojimas

### Ijungimas ir išjungimas

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Naudojant maitinimo elemento skyrių:

**X** Įjungimas: Uždarykite maitinimo elemento skyrių.

Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

**X** Išjungimas: Atidarykite maitinimo elemento skyrių iki pirmo skląščio.

Per klavišinį jungiklį:

**X** Įjungimas ir išjungimas: klavišinį jungiklį nuspauskite ir palaikykite kelias sekundes. Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Įjungus nustatomas **paskutinį kartą** naudotas garsumas ir klausos programa.

Galite pasirinkti, kad būtų girdimas signalas, kai nešiojant klausos aparatą jis įjungiamas arba išjungiamas.

Įjungus funkciją **Power-on delay** (įjungimo delsa), klausos aparatai įsijungia tik po kelių sekundžių. Per tą laiką įsidedant į ausis klausos aparatus nėra nemalonaus švilpimo garso.

Funkciją „Power-on delay“ (įjungimo delsa) gali įjungti klausos specialistas.

## Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:


- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.



Klausos aparato įdėjimas:

- ✗ Jei naudojate Click Sleeves, pasirūpinkite, kad Click Sleeve linkis sutaptų su imtuvo laido linkiu.

Teisinga:

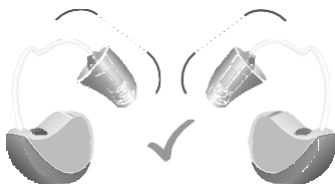

Klaidinga:




✗ Laikykite imtuvo laidą už linkio arčiau į ausį kišamos dalies.

✗ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ❶.

✗ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.

✗ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkeltite virš viršutinės ausies dalies ❷.

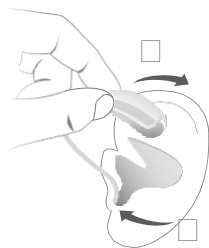

#### **PERSPĖJIMAS**

Pavojus susižeisti!

✗ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.



● Gali būti patogiau **dešiniąjį** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairįjį** – **kairiąja**.

● Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.

Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, darykite taip:


- ✘ Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies įdubos dugną (žr. paveikslėlį).





Klausos aparato išėmimas:

- X** Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ①.
- X** Jeigu naudojate klausos aparatą su pritaikytu įdėklų arba Click Mold, jį išimkite traukdami link pakaušio už mažo išimti skirto laidelio.
- X** Naudodami bet kokias kitas į ausį kišamas dalis: Ausies kanale esantį imtuvą suimkite dviem pirštais ir atsargiai ištraukite ②.  
Netraukite imtuvo laido.

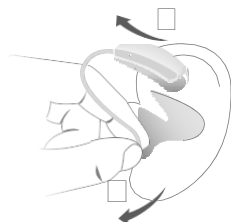

#### **PERSPĖJIMAS**

Pavojus susižeisti!

- X** Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir nudžiovinkite. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.



## Garsumo nustatymas

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

**X** Jeigu pageidaujate reguliuoti garsumą rankiniu būdu, paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

## Klausos programos keitimas

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

**X** Jei norite pakeisti klausos programą, paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.



### **Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)**


Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užesio terapijos signalo lygiui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

## Ypatingos klausymosi sąlygos

### Kalbant telefonu

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.

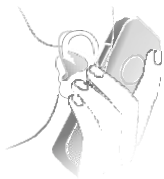

### Kalbėjimo telefonu programa

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

**x** Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.



## Garso transliacija naudojant iPhone

Jūsų klausos aparatai yra **Made for iPhone** (pritaikyti iPhone) klausos aparatai. Tai reiškia, kad naudodami klausos aparatus galite atsiliiepti į skambučius ir klausytis muzikos iš iPhone.

Norėdami daugiau informacijos apie su iOS suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## Lėktuvo režimas

Vietose, kuriose Bluetooth technologiją naudoti uždrausta (pvz., kai kuriuose lėktuvuose), galite įjungti lėktuvo režimą. Tokiu būdu jūsų klausos aparatuose laikinai išjungiamas Bluetooth ryšys. Klausos aparatus veiks ir toliau be Bluetooth ryšio, tačiau tiesioginis garso perdavimas srautu ir kitos funkcijos neveiks.

**x** Norėdami įjungti arba išjungti lėktuvo režimą, naudokite klausos aparatų valdiklius.

Daugiau informacijos žr. skyriuje „Valdikliai“.

Apie įjungtą arba išjungtą lėktuvo režimą praneša įspėjamasis garsinis signalas.



## Garso indukcinės kilpos (pasirinktinai)

Kai kuriuose telefonuose ir viešosiose vietose, pvz., teatruose, galima garso signalo (muzikos arba kalbos) per garso indukcinę kilpą paslauga. Naudojant šią sistemą klausos aparatai tiesiogiai priima pageidaujamą signalą, bet aplinkos garsas neiškraipomas.

Jeigu naudojama garso indukcinės kilpos sistema, apie tai dažniausiai informuojama atitinkamais ženklais.



Jeigu norite naudoti šią sistemą, reikalingas specialus maitinimo elementų skyrius. Jis gali būti kaip priedas tik tam tikrų tipų instrumentuose. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

Kur bebūtumėte su garso indukcinė kilpa:

**x** Įjunkite teleritės programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar teleritės programa sukonfigūruota jūsų klausos aparatui.

## Teleritės programa ir nuotolinio valdymo pultelis



### PASTABA

Skirta tik belaidžio ryšio funkciją turintiems aparatams:

suaktyvinus indukcinės ritės (teleritės) programą, dėl nuotolinio valdymo pultelio gali būti girdimas ritmingas garsas.

**x** Naudokite nuotolinio valdymo pultelį didesniu nei 10 cm (4 col.) atstumu.



## Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

### Klausos aparatai

#### Džiovinimas ir laikymas

- X** Leiskite savo klausos aparatams nudžiūti per naktį.
- X** Kai klausos aparatų nenaudojate ilgesnį laiką, laikykite juos sausoje patalpoje, atidarę maitinimo elementų skyrių ir išėmę maitinimo elementus.
- X** Jei reikia daugiau informacijos, klauskite klausos specialisto.

#### Valymas

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- X** Klausos aparatus valykite kasdien, švelniu ir sausu audiniu.
- X** Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkitė prietaisų į vandenį.
- X** Valydami niekada nespauskite.
- X** Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiųjų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.



## Į ausį kišamos dalys


### Valymas

Ant į ausį kišamųjų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

Naudodami bet kokio tipo į ausį kišamas dalis:

- x** Išėmę į ausį kišamas dalis, nedelsdami nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.

Taip ausų siera nepridžius.

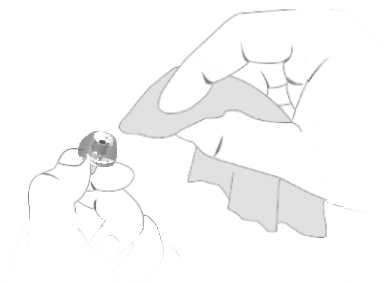

Jei naudojate Click Domes arba Click Sleeves:

- x** Suspauskite į ausį kišamos dalies galiuką.






## Keitimas

Standartinės į ausį kišamos dalis keiskite maždaug kas tris mėnesius. Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, pakeiskite anksčiau. Standartinių į ausį kišamų dalių keitimo procedūra priklauso nuo į ausį kišamos dalies tipo. Skyriuje „Sudedamosios dalys ir pavadinimai“ jūsų klausos specialistas pažymėjo jūsų naudojamą į ausį kišamos dalies tipą.


### Click Domes keitimas

**X** Norėdami išimti seną Click Dome, naudokite išėmimo įrankį arba vadovaukitės ant Click Domes pakuotės esančiais nurodymais. Saugokitės, kad netrauktumėte imtuvo laido.

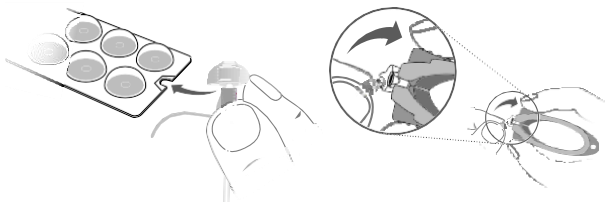


Išėmimo įrankį galima įsigyti kaip priedą.

- ✘ Pasirūpinkite, kad naujasis Click Dome tikrai užsifiksuotų reikiamoje padėtyje.
- ✘ Patikrinkite, ar naujasis Click Dome tvirtai užsifiksavo.

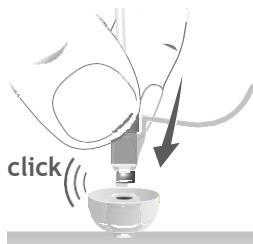

#### Click Sleeves keitimas

- ✘ Išverskite Click Sleeve į išorę.
- ✘ Suimkite Click Sleeve ir imtuvą (neimtovo kabelį) pirštais ir numaukite Click Sleeve.
- ✘ Pasirūpinkite, kad naujasis Click Sleeve tikrai užsifiksuotų reikiamoje padėtyje.

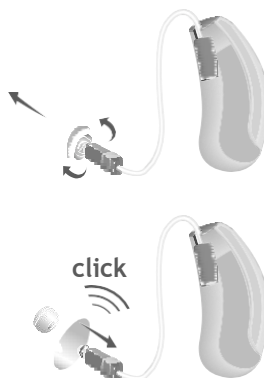



## **Specialistų atliekama techninė priežiūra**

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas įausį kišamas dalis ir ausų sieros filtrus prirėikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų rekomendacijos jums dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.





# Tolesnė informacija

## Informacija saugos klausimais

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.

## Priedai

Galite naudoti programėlę Smartphone App, su kuria galite savo klausos aparatus patogiai valdyti nuotoliniu būdu. Naudodami programėlę taip pat galite išjungti signalinius tonus, kurti asmeninius garso profilius ir atlikti daugelį kitų funkcijų.

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

## Šio dokumento simboliai




Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.

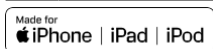

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ ir „Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis prietas



sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų atitikimą. Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio veikimą.

## **Trikčių diagnostika**

### **Problema ir galimi sprendimai**

#### **Silpnas garsas.**

- Pagarsinkite.
- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

#### **Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.**

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
- Pritildykite.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

#### **Garsas iškraipomas.**

- Pritildykite.
- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

#### **Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.**

- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.



## Problema ir galimi sprendimai

---

Klausos aparatas neveikia.

---

- Įjunkite klausos aparatą.
  - Atsargiai iki galo uždarykite maitinimo elemento skyrių.
  - Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
  - Įsitinkite, kad maitinimo elementas įdėtas taisyklingai.
  - Įjungta įjungimo dėsa. Palaukite keletą sekundžių ir patikrinkite dar kartą.
- 

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.



## Su šalimi susijusi informacija



### JAV ir Kanada

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

Pure 312 X

- HVIN: RFM002
- Yra FCC ID: SGI-RFM002
- Yra IC: 267AB-RFM002



## Techninė priežiūra ir garantija

**Serijos numeriai**

**Aparatas**

**Imtuvas**

Kairė:

Dešinė:

### Techninės priežiūros datos

1:

4:

2:

5:

3:


6:

### Garantija



Įsigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

### Jūsų klausos specialistas



**Teisėtas gamintojas**  
Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Vokietija  
Tel. +49 9131 308 0



Document No. 03949-99T02-8X00 LT  
Order/Item No. 109 684 32  
Master Rev01, 07.2019  
© 08.2019, Signia GmbH. All rights reserved

**CE**  
0123

**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**

