

signia

Run Click CIC/ITC

Naudotojo vadovas



Turinys

Ižanga	3
Jūsų klausos aparatai	4
Prietaiso tipas	4
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	4
Maitinimo elementai	6
Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo	6
Elementų keitimas	7
Kasdienis naudojimas	8
Įjungimas ir išjungimas	8
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	9
Techninis aptarnavimas ir priežiūra	12
Klausos aparatai	12
Į ausį kišamos dalys	13
Specialistų atliekama techninė priežiūra	15
Tolesnė informacija	16
Informacija saugos klausimais	16
Šio dokumento simboliai	17
Trikčių šalinimas	17
Su šalimis susijusi informacija	18
Techninė priežiūra ir garantija	19

Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokį kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.

Jūsų klausos aparatai

i Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

Prietaiso tipas

Jūsų klausos aparatai nešiojami tiesiogiai ausies kanale. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Sudedamosios dalys ir pavadinimai

Šiame naudotojo vadove aprašyta keletas klausos aparatų tipų. Naudokitės toliau pateiktais paveikslėliais, kad nustatytumėte, kurį klausos aparato tipą naudojate.

Click ITC



- 1 Į ausį kišama dalis (Click Sleeve)
- 2 Maitinimo elementų skyrius (įjungimo / išjungimo jungiklis)
- 3 Mikrofonas
- 4 Ištraukimo laidas

Click CIC



- 1 Į ausį kišama dalis (Click Sleeve)
- 2 Mikrofonas
- 3 Maitinimo elemento skyrius (įjungimo / išjungimo jungiklis)
- 4 Ištraukimo laidas

Galite naudoti toliau išvardytas standartines į ausį kišamas dalis.

Standartinės į ausį kišamos dalys

- Click Sleeve (S dydis, uždaras)
- Click Sleeve (M dydis, uždaras)
- Click Sleeve (L dydis, uždaras)

Standartinės į ausį kišamas dalis galite lengvai pakeisti. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Maitinimo elementai

Kai maitinimo elementas senka, garsas tampa silpnesnis arba pasigirsta įspėjamasis signalas. Nuo maitinimo elemento tipo priklauso, kiek ilgai galėsite jį naudoti.

Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo

Apie rekomenduojamus maitinimo elementus teiraukitės savo klausos specialisto.

Maitinimo elementų dydis: 312 10

- Klausos aparatams visada naudokite tinkamo dydžio maitinimo elementus.
- Jeigu nenaudosite klausos aparatų keletą dienų, išimkite maitinimo elementus.
- Su savimi visada turėkite atsarginių maitinimo elementų.
- Išseiktus maitinimo elementus nedelsdami išimkite ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų perdirbimo taisyklių.

Elementų keitimas


Maitinimo elemento išėmimas:

- ✘ Atidarykite maitinimo elemento skyrių.
- ✘ Rankomis išimkite maitinimo elementus.



Maitinimo elemento įdėjimas:

- ✘ Jei maitinimo elementas yra su apsaugine plėvele, ją nuimkite tik tada, kai būsite pasirengę naudoti maitinimo elementą.
- ✘ Įdėkite maitinimo elementą taip, kad „+“ simbolis būtų nukreiptas aukštyn

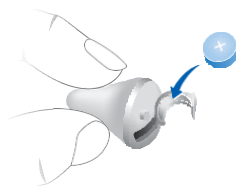

- ✘ Atsargiai uždarykite maitinimo elemento skyrių. Jei jaučiate pasipriešinimą, maitinimo elementas įdėtas neteisingai.

Maitinimo elemento skyriaus nebandykite uždaryti naudodami jėgą. Galite jį sulaužyti.

Kasdienis naudojimas

Ijungimas ir išjungimas

Naudojant maitinimo elemento skyrių

- x** Išjungimas Iki galo atidarykite maitinimo elementų skyrių.
- x** Ijungimas Uždarykite maitinimo elementų skyrių.

Kai nešiojant klausos aparatą jis įjungiamas arba išjungiamas, girdimas signalas.

Klausos aparatas įsijungia tik po kelių sekundžių. Per tą laiką įsidedant į ausis klausos aparatą nėra nemalonaus švilpimo garso.

Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ✗ Klausos aparatą visada naudokite su į ausį kišama dalimi.
- ✗ Įsitinkinkite, kad į ausį kišama dalis yra gerai pritvirtinta.

Klausos aparato įdėjimas:

- ✗ Išsiaiškinkite, kuris klausos aparatas yra dešinysis, o kuris kairysis, kad įdėtumėte jį į tinkamą ausį. Ant klausos aparatų esančios etiketės nurodo puses:

R – dešinioji ausis

L – kairioji ausis

- ✗ Pasirūpinkite, kad Click Sleeve skydelis būtų nukreiptas į ant klausos aparato išspausdintą tekstą.

teisingai



klaidingai




- x Prieš dėdami klausos aparatą paimkite jį tinkama padėtimi. Atkreipkite dėmesį į ištraukimo laidą, nurodantį apačią. Jei ant klausos aparato atspausdinta rodyklė, ji turėtų būti nukreipta į viršų.



- x Atsargiai įstumkite klausos aparatą į ausies kanalą.

- x Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.

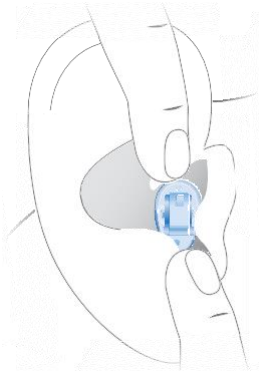

i

- Gali būti patogiau **dešinią** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairiąjį** – **kairiąja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.

Klausos aparato išėmimas:



PASTABA

Norėdami išimti klausos aparatą, niekada netraukite už maitinimo elemento skyriaus dangtelio. Taip galite sugadinti klausos aparatą.

- x** Šiek tiek spustelėkite ausį iš galo, kad atpalaiduotumėte klausos aparatą.
- x** Išimkite klausos aparatą traukdami jį pakaušio link už išėmimo virvutės.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- x** Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir nudžiovinkite. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

Klausos aparatai

Džiovinimas ir laikymas

- X** Leiskite savo klausos aparatui nudžiūti per naktį.
- X** Kreipkitės į savo klausos specialistą dėl rekomenduojamų džiovinimo skirtų gaminių.
- X** Kad apsaugotumėte klausos aparatus nuo drėgmės poveikio, kai jų nenaudojate ilgesnį laiką, laikykite juos džiovinimo sistemoje, atidarę maitinimo elementų skyrių ir išėmę maitinimo elementus.

Valymas

Dėl higienos ir dėl to, kad klausos aparatai veiktų tinkamai, valykite juos kas dieną.

- X** Klausos aparatus valykite kasdien, švelniu ir sausu audiniu.
- X** Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkitė prietaisų į vandenį.
- X** Valydami niekada nespauskite.
- X** Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiųjų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.




Į ausį kišamos dalys

Valymas

Ant į ausį kišamųjų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

- ✗ Išėmę į ausį kišamas dalis, nedelsdami nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.

Taip ausų siera neprisidžius.

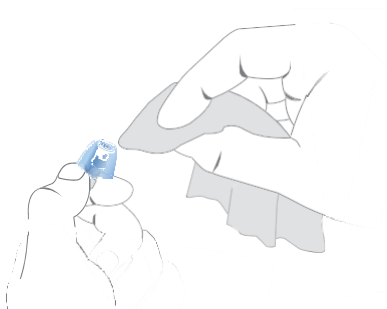

- ✗ Suspauskite į ausį kišamos dalies galiuką.



Keitimas

Standartines į ausį kišamas dalis keiskite maždaug kas tris mėnesius. Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, pakeiskite anksčiau.

Click Sleeves keitimas

- ✗ Suimkite Click Sleeve pirštais ir jį ištraukite.
- ✗ Montuodami naują Click Sleeve pasirūpinkite, kad Click Sleeve skydelis būtų nukreiptas į ant klausos aparato išspausdintą tekstą.

teisingai



klaidingai



- ✗ Pasirūpinkite, kad naujasis Click Sleeve tikrai užsifikuotų reikiamoje padėtyje.





Specialistų atliekama techninė priežiūra

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatus ir atlikti techninę priežiūrą.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų jūsų asmeninės rekomendacijos dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.



Tolesnė informacija

Informacija saugos klausimais

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.

Skirta klausos priežiūros specialistams

Šie klausos aparatai yra pritaikomi su išmaniojo telefono programėle.

X Perskaitykite saugos informaciją ir pritaikymo instrukcijas, kurios pateikiamos programėlėje.

Atkreipkite dėmesį:



PERSPĖJIMAS

Yra rizika pabloginti likutinę kliento klausą.

X Norint gauti teisingus pritaikymo rezultatus, klientai turi sugebėti teisingai atsakyti į klausimus apie savo klausą. Todėl nurodyta pritaikymo procedūra turi būti naudojamas tik asmenims, kurie yra protiškai pajėgūs teisingai atsakyti į klausimus apie savo klausą.



PASTABA

X Jei išbandęs kelis garso profilius klientas yra nepatenkintas, klausos aparato tipas gali būti netinkamas. Išbandykite kitą klausos aparato tipą.



Šio dokumento simboliai



Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.

Trikčių šalinimas

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Atsargiai iki galo uždarykite maitinimo elemento skyrių.
- Nuvalykite klausos aparatą.
- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite klausos aparatą iš naujo, kol jis tinkamai prisitaikys.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

Garsas iškrapomas.

- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.



Problema ir galimi sprendimai

Klausos aparatas neveikia.

- Įjunkite klausos aparatą.
- Atsargiai iki galo uždarykite maitinimo elemento skyrių.
- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo elementas įdėtas taisyklingai.
- Įjungta įjungimo dėsls. Palaukite keletą sekundžių ir patikrinkite dar kartą.

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.



Su šalimi susijusi informacija



Techninė priežiūra ir garantija

Serijos numeriai

Kairė:

Dešinė:

Techninės priežiūros datos

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantija



Įsigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

Jūsų klausos specialistas



Teisėtas gamintojas
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Vokietija
Tel. +49 9131 308 0



Document No. 03123-99T02-8X00 LT
Order/Item No. 109 448 60
Master Rev03, 04.2019
© 05.2019, Signia GmbH. All rights reserved

CE
0123

www.signia-hearing.com

